

RITIRO

- 1 RITIRO WristBand**
Prelevare un WristBand dall'AREA PULITO e indossarlo sul **polso dominante**.



- 2 Accesso all'Hub**
Appoggia la SmartKey sull'Hub e attendi l'accensione del LED.



- 3 Ritiro Handot**
Attendi l'assegnazione e ritira l'Handot acceso.



**Handot Acceso
Pronto al ritiro**




USO


- 4 Aggancio Handot**
Appoggiare magneticamente l'Handot sul WristBand, rispettando l'orientamento corretto.



**Orientamento
HANDOT**

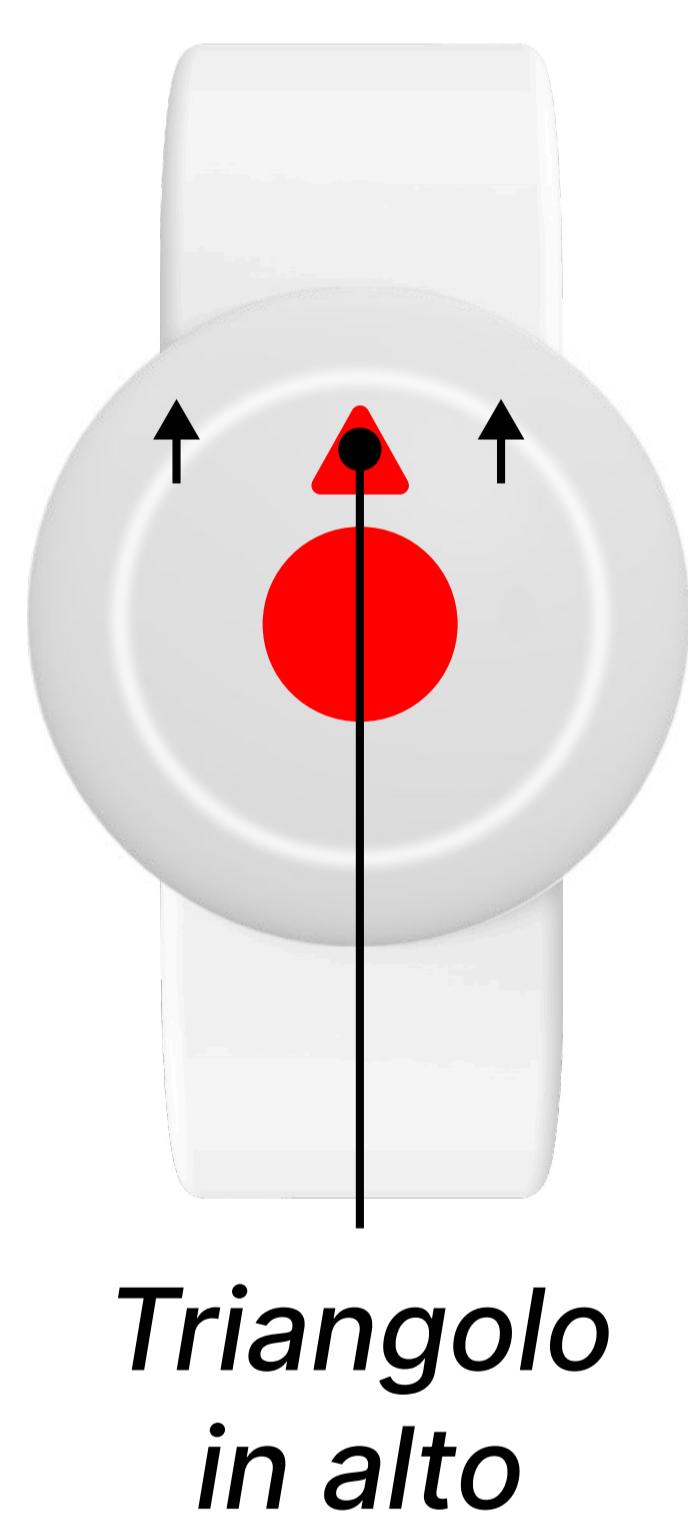


WristBand: Indossare il WristBand sul **polso dominante**.

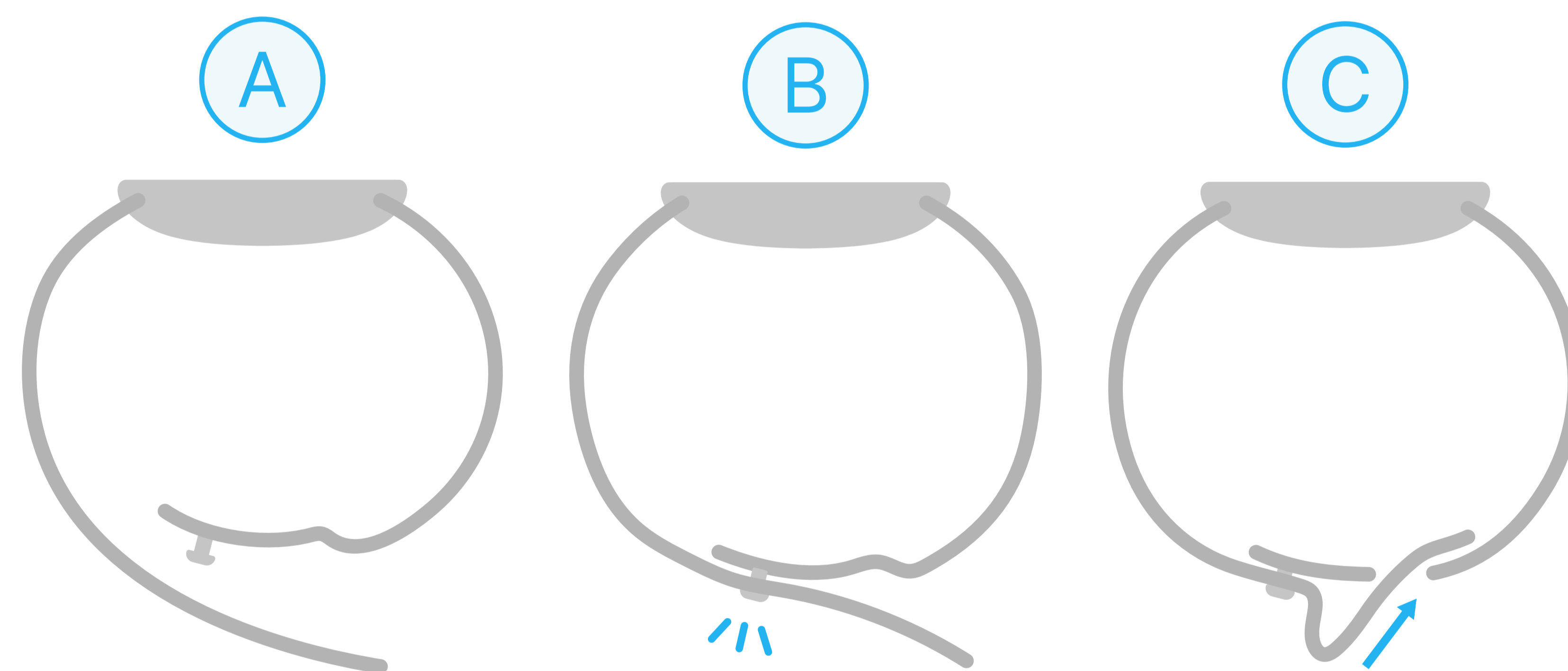


CONSEGNA

**Per la consegna NON serve la SmartKey*

- 5 Riconsegna Handot**
Appoggiare l'Handot sull'Hub e **ruotarlo fino alla conferma** di riconsegna, indicata dal segnale acustico e dal LED verde acceso.

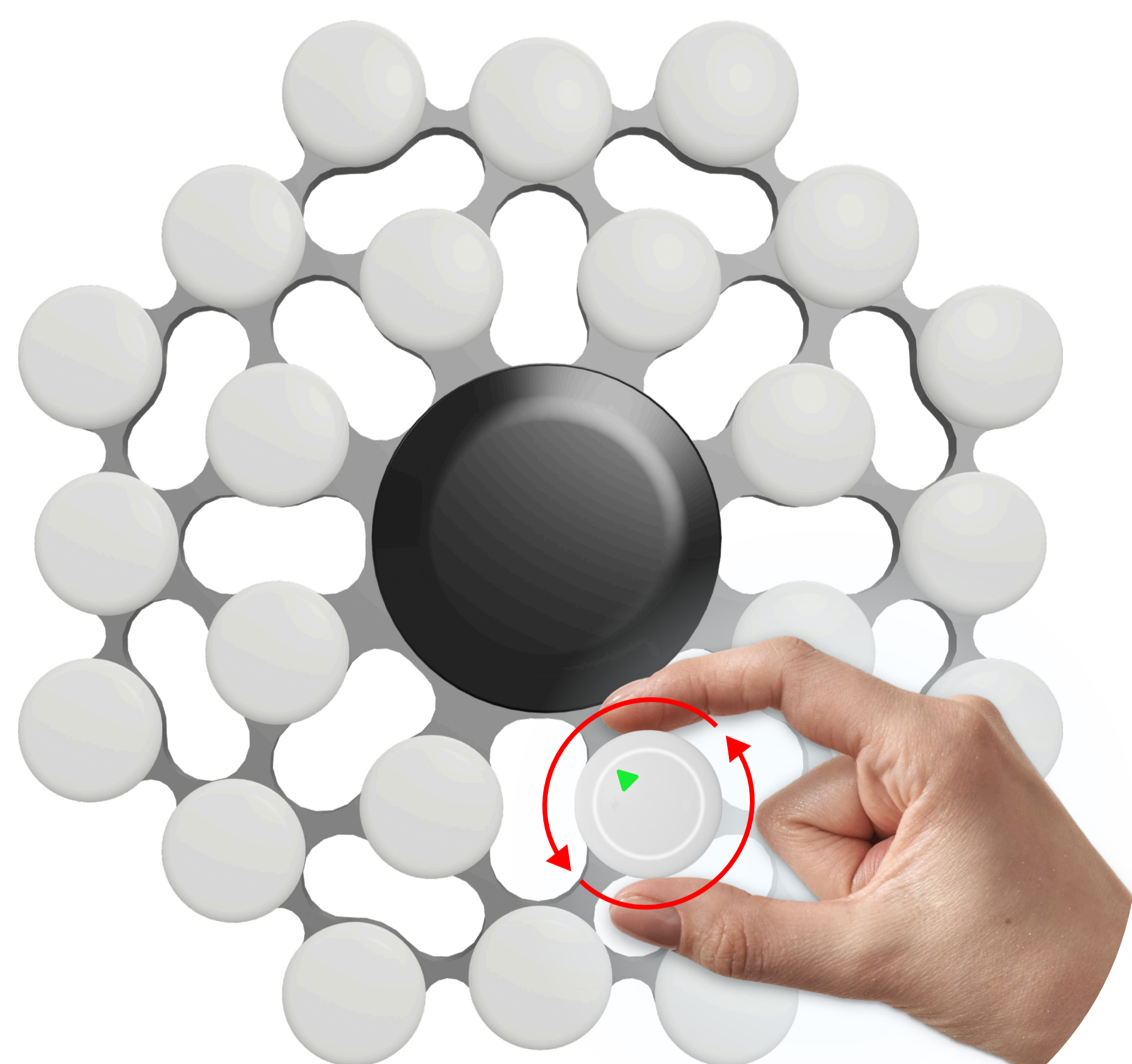


CONSEGNA CORRETTA

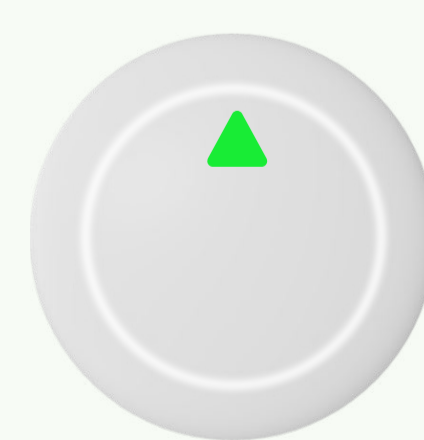

Suono ON

Led ON

NON CONSEGNATO

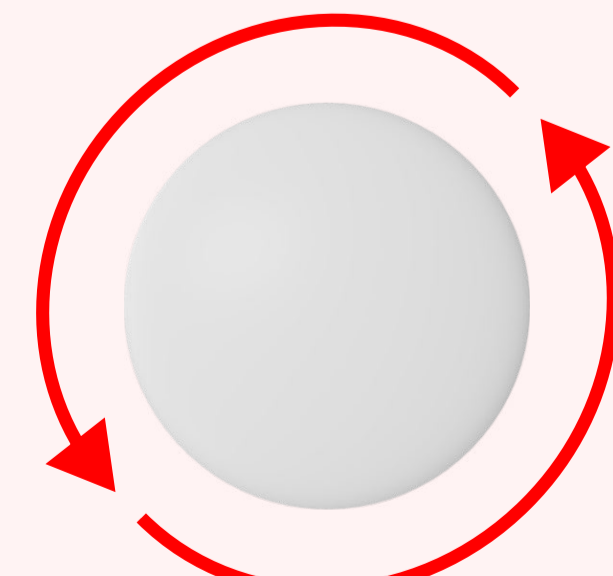

Suono OFF

Led OFF

- 6 CONSEGNA WristBand**
Togliere il WristBand e riporlo nell'AREA SPORCO.

