

SANIFICAZIONE WRISTBAND

- 1 PRELIEVO DA AREA SPORCO**
Preleva i *WristBand* dall'**AREA SPORCO**.



AREA SPORCO

- 2 PULIZIA MANUALE PRELIMINARE**
Effettua una *pulizia manuale preliminare* dei WristBand utilizzando *detergente idoneo*.



- 3 SANIFICAZIONE CON UV STATION**
Inserisci i *WristBand* nella *UV Station* e *chiudi il coperchio*.
Il *ciclo UV parte automaticamente* e, dopo *3 minuti*, i WristBand sono *sanificati*.



- 4 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI**
Igienizza le mani prima di spostare i WristBand nell'**AREA PULITO**.
Questo passaggio è necessario per *evitare ricontaminazioni*.



- 5 SPOSTAMENTO IN AREA PULITO**
Estrai i WristBand dalla UV Station e riponili nell'**AREA PULITO**.
I WristBand in AREA PULITO sono pronti per il ritiro e l'utilizzo.



AREA PULITO